

“華碩” 心電圖應用軟體

“ASUS” HealthConnect (ECG App)

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

「本產品涉及個人資料之蒐集、處理及利用，應遵守個人資料保護法之規範。」

衛部醫器製字第 007431 號

產品型號：

(手機端) ASUS ECG SW 3.3.X

(手錶端) ASUS ECG FW 2.0.X


適用系統：

1. ASUS VivoWatch SP 以上之手錶；2. Android 6.0 以上；3. iOS 11.0 以上

產品敘述及用途：

本產品是一款行動裝置使用的醫療應用軟體，搭配華碩 VivoWatch 健康錶一起使用，以建立、記錄、儲存傳送和顯示與第一導程 (Lead I) 相似的單通道心電圖，提供心電圖供醫生判讀心房顫動 (Atrial Fibrillation, AFib) 或竇性心律。本產品不適用於患有其他已知心律不整的用戶。本產品顯示的心電圖資料僅供參考。使用者需諮詢合格的醫師才可根據裝置輸出的資訊來解讀或採取臨床措施，而不是來取代傳統的診斷或醫療方法。本產品不適用於未年滿 22 歲的人士。

架構圖：

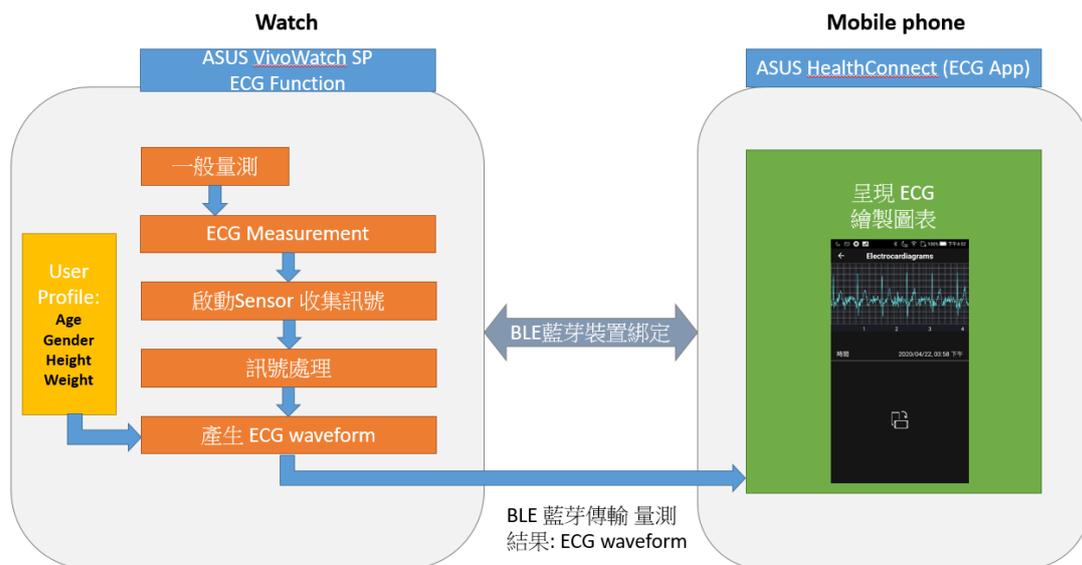

警告及安全注意事項：

- 當您的華碩VivoWatch健康錶靠近強大電磁場域時，如電磁防盜系統或金屬探測器時，請勿使用心電圖。
- 請勿在進行醫療程序時使用記錄功能（如磁振造影、透熱療法、震波碎石術、燒灼術、體外心臟去顫程序）。
- 當華碩VivoWatch健康錶處於使用手冊所指示的操作溫度(5°C~40°C)範圍外時，請勿進行使用。
- 請勿使用本產品診斷心臟相關的疾病。
- 請勿與心律調節器、植入式去顫器 (ICD) 或其他植入式電子裝置一起使用。
- 請勿在進行體能活動時使用記錄功能。
- 請勿在未經醫師許可，自行變更藥物處方或採取臨床治療。
- 不適用於未滿22歲的人士。
- 若您的靜止心率突然低於50或高於120，您應該儘快諮詢醫師。
- 本產品所記錄的心電圖，並不是心臟狀況的完整診斷。使用者需諮詢合格的醫療專業人士才可根據裝置輸出的資訊來解讀或採取臨床措施，而且不可用來取代傳統的診斷或醫療方法。
- 建議您在手機中加入密碼（個人識別號碼 [PIN]）、臉部辨識或觸控辨識（指紋）以增強安全性。保護手機的安全十分重要，因為您將在其中儲存個人健康資訊。

製造業者名稱：華碩電腦股份有限公司

製造業者地址：台北市北投區立德路 15 號 1 樓

醫療器材商名稱：華碩電腦股份有限公司

醫療器材商地址：依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載
(市售品須刊載實際地址)